Der Schlüssel zu mehr Produktivität

Das lichthärtende metacon Wachs bietet enorme Qualitäts- und Zeitvorteile in allen Anwendungsbereichen.





Joachim Mosch e.K. Tannenwaldallee 4 D-61348 Bad Homburg / Germany Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0 Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99

primotec@primogroup.de www.primogroup.de

SCHNELLER ZUM ERFOLG

metacon

DAS lichthärtende Wachs

Das metacon System kombiniert auf ideale Weise Wachsund Kunststoffanteile mit Fotoinitiatoren. So lässt sich das Material vor der Lichthärtung wie Wachs verarbeiten. Durch Polymerisation wird das metacon Wachs zu Kunststoff.





metacon System



Implantatbrücke



Implantatsteg



Tertiärstruktur modelliert ...



... und gegossen



Implantatstruktur polymerisiert



... bei der Gerüsteinprobe




Kronen und Brücken



Presskeramik



Scannen

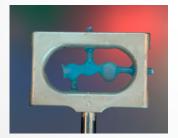

Scan Rahmen ZirkonZahn, Ceramill, Cercon, etc.



UK Klammerprothese



zwei UK Bügel in einer Muffel!



Anwendungsgebiete

Das metacon System ist universell einsetzbar für

• Kronen- und Brückengerüste

» Implantatstrukturen aller Art

- Presskeramik Modellationen
- Kombinierte Arbeiten aller Art
- Klammerprothesen
- Totale OK Platten

direkt auf den Meistermodell – ohne Dubliermaterial und Einbettmassemodell



Vorteile

- · kein Einbettmassemodell
- · keine Silikon- oder Geldublierung
- präziser als konventionelle Wachssysteme
- schafft große Qualitäts- und Zeitvorteile
- lässt sich wie konventionelles Wachs verarbeiten
- · wird durch Lichthärtung zu Kunststoff
- zeigt keinerlei Schrumpfung oder Verzug nach der Polymerisation
- ist als Kunststoff sehr stabil und dennoch flexibel
- · hat ein exakt justiertes Rückstellverhalten
- kann vor dem Einbetten einfach ausgearbeitet werden
- verbrennt rückstandsfrei und ohne zu quellen
- erhältlich als Wachsprofile oder Modellierwachs

metalight

Lichthärtegeräte mini, trend & classic (mehr Informationen auf Seite 11)



Technik - Tipps

Zur besseren Temperaturkontrolle empfiehlt es, sich mit einem elektrischen Wachsmesser zu modellieren. Alternativ kann das metacon Wachs "kalt" modelliert, d.h. geknetet werden, da das Material schon wenig über Zimmertemperatur perfekte Modelliereigenschaften aufweist.

Um modellierte metacon Klammerprothesen nach dem Lichthärten einfach vom Meistermodell abheben zu können, sollten immer die metacon System Isolierungen verwendet werden.

Nicht zu detailreich modellieren. Es ist einfacher und produktiver, erst zu polymerisieren und Formdetails in der Kunststoffphase mit rotierenden Instrumenten auszuarbeiten.

Für beste Ergebnisse sollte das metacon Wachs immer in den speziell auf dieses Material abgestimmten Metalight Lichthärtegeräten vom primotec polymerisiert werden.

Geräte, deren Polymerisationskammer sich im Betrieb erwärmt und / oder Stroboskoplichthärtegeräte, sind zum Aushärten des Metacon Wachses nicht geeignet.



Hintergrundinfo

Das lichthärtende metacon Wachs ist eine besondere chemische Verbindung von aufgespaltenen, mit Fotoinitiatoren konditionierten, Kohlenstoffketten und einer speziell abgestimmten Wachsmischung. Metacon Wachsprofile und Modellierwachs sind chemisch identisch, haben aber eine unterschiedliche Dichte.

SCHNELLER ZUM ERFOLG

Arbeitsablauf



nach dem Vermessen, Anzeichnen und Isolieren wird die Metaseal Isolierung aufgetragen



Metaform Wachsprofile sind als Klammern, Retentionen, genarbte Platten, Bügel, etc. verfügbar



mit Hilfe des Metavac erzielt man höchste Passgenauigkeit



nach der Lichthärtung wird der Metacon Kunststoff mit Fräsern oder Gummipolierern ausgearbeitet



die fertige Arbeit

ist die Modellation abgeschlossen, wird sie angestiftet, abgehoben und eingebettet



mit dem Metaring Einbettsystem können problemlos drei Modellationen auf einmal vertikal eingebettet werden



für beste Passung nach dem Guss sollte die Konzentration der Einbettmasseflüssigkeit um ca. 10% erhöht werden



optimaler Materialeinsatz: drei "Modell"- Güsse, ein Gusstrichter und ein Minimum an Einbettmasse

metacon System

Publikationen

- Es geht auch einfacher ...
 ...oder simplify your dental life
 ZT Joachim Mosch &
 ZTM Andreas Hoffmann
- Das vertikale Einbetten von Modellguß-Modellationen
 ZTM Etienne Brand, ZT Frank Beck
- Von A bis Z kalt modelliert
 Wärmefreies Modellieren eines
 14-gliedrigen Brückengerüsts
- Klammerprothesen leicht gemacht ZT Joachim Mosch, Bad Homburg
- Das Metaconsystem Teil 1 + 2
 ZT Bettina Cortéz

Diese und weitere Veröffentlichungen finden Sie unter www.primogroup.de oder fragen Sie nach einem kostenlosen Sonderdruck unter Tel. 06172 - 99 77 0 - 0





Praktische Arbeitskurse

- MetaconSystem Einsteigerkurs
 In diesem Kurs lernt der Teilnehmer den präzisen und richtigen Umgang mit dem lichthärtenden Wachs des metaconSystems
- MetaconSystem Spezialkurse
 Vertiefen Sie Ihre metacon-Fertigkeiten in einem Spezialkurs, wie z.B.
- a) Klammer-Modellguss
- b) Kombi-Modellguss
- c) Spezial Riegel Drehriegel
- d) Spezial Riegel Schwenkriegel
- e) Spezial Geschiebe

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Website unter **www.primogroup.de** oder direkt bei ZTM Andreas Hoffmann – Dentales Service Zentrum – unter **www.1dsz.de**. Auch individuelle Termine und Schulungen macht das DSZ Team gerne möglich.

BESTELLINFORMATION

metaconSystem – Starter Sets und Kits				
Bestellnummer	Beschreibung	Preis		
MC Starter Set M	metaconSystem Starter Set M ML120: metalight mini - Lichthärtegerät mit Kühlsystem IM200: Metatouch - Handisolierung (43 gr.) IM300: Metaseal - Modellisolierung (43 gr.) MW100: Metawax - Modellierwachs (20 gr.) Metaform Gusskanäle - 3,5 mm (6 Stück) Metaform Rundstangen - 6 mm (3 Stück) Metaform glatte Platte - 0,55 x 67 x 130 mm (1 Blatt) Know-How-DVD	€ 489,00		
MC Starter Set T	metaconSystem Starter Set T ML110: metalight trend - Lichthärtegerät mit Kühlsystem IM200: Metatouch - Handisolierung (43 gr.) IM300: Metaseal - Modellisolierung (43 gr.) MW100: Metawax - Modellierwachs (20 gr.) Metaform Gusskanäle - 3,5 mm (6 Stück) Metaform Rundstangen - 6 mm (3 Stück) Metaform glatte Platte - 0,55 x 67 x 130 mm (1 Blatt) Know-How-DVD	€ 939,00		
KB-KIT	Kronen + Brückentechnik KIT IM200: Metatouch - Handisolierung (43 gr.) IM300: Metaseal - Modellisolierung (43 gr.) GK300: Metaform Gusskanäle - 3,5 mm (53 gr.) GK400: Metaform Rundstangen - 6 mm (60 gr.) MW100: Metawax - Modellierwachs (20 gr.) PP151: Metaform glatte Platte - 0,55 x 67 x 130 mm (6 Blatt) Verkauf nur in Verbindung mit einem Metalight-Gerät möglich, oder wenn bereits ein Metalight-Gerät vorhanden ist.	€ 299,00		
MG-KIT	Modellgusstechnik KIT BP300: Metaform UK Bügel gerade Tropfenform (40 gr.) ES100: Eisspray (2 x 150ml) IM200: Metatouch - Handisolierung (43 gr.) IM300: Metaseal - Modellisolierung (43 gr.) IM300: Metaform Gusskanäle - 3,5 mm (53 gr.) KP100: Metaform geschwungene Klammer mittel (100 Stück) PP301: Metaform genarbte Platte 0,55x67x130mm (6 Blatt) RP200: Metaform Lochbandretentionen (6 Blatt - 45 Stück) VB100: Metaform Lochbandretentionen (5 Blatt - 45 Stück) VB100: Metabond - Verbindungskleber (10ml) Verkauf nur in Verbindung mit einem Metalight-Gerät möglich, oder wenn bereits ein Metalight-Gerät vorhanden ist.	€ 529,00		
TZ-KIT	Vakuum-Tiefzieh Kit KD100: Latexabdeckung (36 Blatt) MG100: Metagran - Spezialgranulat (120 gr.) MP100: Metapump - Vakuum-Pumpe MV100: Vakuum-Tiefziehbehälter nicht mit metalight mini verwendbar.	€ 299,00		

Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versand

[BESTELLINFORMATION]

Doctollar	Doochroihung	Droio		
Bestellnr.	Beschreibung	Preis		
Klammerprofile				
KP100 KP500	Metaform geschwungene Klammer mittel - Prämolar (5 Blatt, 100 Stück)	- , - ,		
Platten				
PP301 PP401 PP305 PP405 PP151 PP251	Metaform genarbte Platte - 0,55 x 67 x 130 mm (6 Blatt) Metaform genarbte Platte - 0,65 x 67 x 130 mm (6 Blatt) Metaform grob genarbte Platte - 0,55 x 67 x 130 mm (6 Blatt) Metaform grob genarbte Platte - 0,65 x 67 x 130 mm (6 Blatt) Metaform glatte Platte - 0,55 x 67 x 130 mm (6 Blatt) Metaform glatte Platte - 0,80 x 67 x 130 mm (6 Blatt)	€ 75,10 € 75,10 € 75,10 € 75,10		
Lingualbüge				
BP100 BP300 BP400	Metaform UK Bügel geschwungen (5 Blatt, 40 Stück) Metaform UK Bügel gerade Tropfenform (40gr.) Metaform UK Bügel gerade Trapezform (40gr.)	€ 75,10		
Retentionen				
RP100 RP200 RP350 RP400	Metaform Lochretentionen für zahnlose Kiefer (5 Blatt, 10 Stück) Metaform Lochretentionen (6 Blatt, 6 Stück) Metaform Doppelkammerretentionen (5 Blatt, 40 Stück) Metaform Lochbandretentionen (5 Blatt, 45 Stück)	€ 73,90 € 73,90		
Gusskanäle	Stangen und Halbrundstäbe			
GK100 GK200 GK300 GK400 GK500	Metaform Gusskanäle – 1,5 mm (15gr.) Metaform Gusskanäle – 2,5 mm (30gr.) Metaform Gusskanäle – 3,5 mm (53gr.) Metaform Rundstangen – 6 mm (60gr.) Metaform Halbrundstab – 1,6 (16gr.) Metaform Halbrundstab – 2,2 (22gr.)	€ 72,10 € 72,10 € 75,10 € 73,90		

Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versand

BESTELLINFORMATION

Bestellnr.	Beschreibung		Preis
MW100		awax ellierwachs (20gr.)	€ 33,90
IM200	(C Marie	atouch disolierung (43gr.)	€ 33,90
IM300	C September 1	aseal ellisolierung (43gr.)	€ 33,90
ES100		acool oray (2 Dosen á 150ml)	€ 19,90
MV100	Meta Vaku	avac uum-Tiefziehbehälter	€ 279,0
MP100	A .	a pump d-Vakuumpumpe	€ 25,50
MG100		agran zialgranulat (120 gr.)	€ 6,10
KD100	Comment of the later	atex latex covers xabdeckungen (36 Stück)	€ 35,00

Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versand

Spannungsfreie Lichthärtung

innovatives Kühlsystem für verzugfreie Polymerisation

metalight mini

das kleinste und preisgünstigste metalight Modell. Durch seine geringen Abmessungen eignet es sich perfekt für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz. So werden Wege verkürzt, Zeit gespart und die Engstelle Lichthärtegerät im Labor entschärft. Das metalight mini bietet Platz für bis zu zwei Gipsmodelle.

metalight trend

bietet mehr Innenraumvolumen als das metalight mini und ist mit der komfortab-"Easy-Touch-Tastatur" ausgestattet. Die Polymerisationsdauer 5, 10 oder 15 Minuten wird einfach per Tastendruck gewählt und läuft vollautomatisch ab. Polymerisationskam-Die mer bietet ausreichend Platz für bis zu vier Gipsmodelle, höhere Modelle mit Artikulatorsockel oder die Metavac Tiefzieheinheit.

metalight classic

besticht durch eine außergewöhnlich große Polymerisationskammer, in der selbst ein komplexer Artikulator Platz findet. Durch 12 kreisförmig angeordnete UV-Leuchtmittel im Spektralbereich 320 - 400 nm (optional 320 - 500 nm), verbunden mit der speziellen Innenlackierung wird eine größtmögliche Lichtausbeute erreicht. Auch das metalight classic ist mit der "Easy-Touch-Tastatur" ausgestattet, wobei die Mikroprozessorsteuerung Leuchtmittel und Kühlung automatisch ein- und ausschaltet. Ein integrierter Feinstaubfilter schützt die Werkstücke und das Gerät vor Verschmutzung.

BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
ML120	metalight mini – Breitband-Lichthärtegerät mit Kühlsystem zwei UV-Speziallampen (Spektrum: 320nm bis 500nm) 230 V / 50 Hz; L=310mm, Ø=120mm, H=162mm nicht geeignet bei Verwendung mit dem metacon TZ Kit	329,00 €
ML110	metalight trend – Breitband-Lichthärtegerät mit Kühlsystem vier UV-Speziallampen (Spektrum: 320nm bis 500nm) drei einstellbare Polymerisationszeiten 230 V / 50 Hz; L=330mm, Ø=180mm, H=230mm	759,00 €
ML100	metalight classic – Breitband-Lichthärtegerät mit Kühlsystem zwölf UV-Speziallampen (Spektrum: 320nm bis 400nm)* drei einstellbare Polymerisationszeiten 230 V / 50 Hz; H=383mm, Ø=243mm *auf Wunsch auch bis 500 nm	1.889,00 €
ML800	metalight Ersatzleuchtmittel 9W/78/G23 – Spektralbereich 320 - 400nm	25,50 €
ML801	metalight Ersatzleuchtmittel 9W/71/G23 – Spektralbereich 400 - 500nm	25,50 €

*Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versand