

DAS NEUE LEVEL DER VIELSEITIGKEIT

PREMIO ALEGRA

das vier Gradienten Multilayer Zirkon der Premiumklasse

PREMIO **Alegria** ist das multifunktionale, mehrdimensionale Zirkondioxid, mit dem alle Indikationen für monolithischen Zahnersatz perfekt abgedeckt werden. Es vereint herausragende Ästhetik mit höchster Stabilität durch die vier Gradienten, die dieses innovative Material auszeichnen.

Produktbeschreibung

Mit **PREMIO Alegra PRO** und **SMILE** Zirkondioxid lassen sich selbst die anspruchsvollsten Patientenfälle ästhetisch äußerst ansprechend, sehr sicher und verlässlich biokompatibel lösen.

Die vier integrierten Gradienten - Farbe, Transluzenz, Biegefestigkeit und Risszähigkeit - schaffen eine ideale Kombination aus sehr guten lichtoptischen und mechanischen Eigenschaften. So wird dieses innovative Material zum „game changer“ in Labor und Praxis.

Die harmonischste Verbindung von Ästhetik und Stabilität - **PREMIO Alegra**

DAS PREMIUM ZIRKON FÜR ALLE FÄLLE





PREMIO Alegra **PRO** - alle Indikationen - keine Limits

Verantwortlich für die ästhetischen Qualitäten der **PREMIO Alegra PRO** Zirkon Blanks sind die Multi Color Schichtung und die kontinuierlich ansteigende Transluzenz des Materials.

- Im Detail: durch den Multicolor-Gradienten entsteht ein natürlicher, harmonischer Farbverlauf der vollanatomischen Zirkonrestauration von zervikal nach inzisal.
- Die Transluzenz der **PREMIO Alegra PRO** Ronde erhöht sich von 43% im Zahnhalsbereich stufenlos auf knapp 47% im Bereich der Schneide. Damit bieten diese beiden Gradienten beste Voraussetzungen für eine hohe ästhetische Wirkung.

Doch Ästhetik allein genügt nicht, um als innovativer, monolithischer Werkstoff universell einsetzbar zu sein. Um dem Anspruch „ein Zirkon für alle Fälle“ gerecht zu werden, müssen auch Biegefestigkeit und Risszähigkeit stimmen. Und beide Werte sind bei **PREMIO Alegra PRO** bemerkenswert.

- So weist die Biegefestigkeit einen Wert von 1300 MPa zervikal auf, der sich nach inzisal sukzessive auf 1027 MPa reduziert. Im Bereich der Verbinder stehen immer noch zwischen 1200 und 1100 MPa zur Verfügung.
- Die Risszähigkeit von **PREMIO Alegra PRO** liegt im Zahnhalsbereich bei $> 3,5 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$ und steigert sich zur Schneide hin auf $> 5 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$. Damit können problemlos alle Stabilitätsansprüche selbst für die umfangreichsten zahntechnischen Zirkon-Arbeiten erfüllt werden.

PREMIO Alegra **SMILE** - kompromisslos natürliche Ästhetik

Wenn es ästhetisch noch etwas mehr sein soll, dann kommt **PREMIO Alegra SMILE** zum Einsatz. Bei diesem Premium-Material, das den Vergleich mit Lithiumdisilikat-Keramiken nicht scheuen muss, sind zwei der vier Alegra Gradienten noch mehr in Richtung Ästhetik optimiert.

Mit einer Transluzenz von 47% zervikal bis knapp 49% im Inzisalbereich und einer Biegefestigkeit von immerhin 1000 MPa im Zahnhalsbereich, zwischen 900 MPa und 800 MPa im Bereich der Verbinder und 727 MPa im Schneidebereich, lassen sich mit **PREMIO Alegra SMILE** Einzelkronen bis hin zu viergliedrigen Brücken mit unvergleichlicher Schönheit herstellen.

MEHR ÄSTHETIK MEHR STABILITÄT MEHR VIELSEITIGKEIT



PRO

PREMIO

ALEGRA





bemalt und glasiert

Anwendungsgebiete

Herstellung von vollkeramischen Kronen und Brücken jeder Spannweite, vollanatomisch, reduziert oder als Gerüst zur Verblendung, im Front- und Seitenzahnbereich mit höchstens zwei Zwischengliedern mittels dentaler CAD/CAM - Frästechnik.



glasiert



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
nur gesintert



DIE NÄCHSTE GENERATION DER VOLL- KERAMIK



Detail nur gesintert



Detail glasiert

Anwendungsgebiete

Herstellung von vollkeramischen Einzelkronen und Brücken bis max. vier Glieder, vollanatomisch, reduziert oder als Gerüst zur Verblendung, im Front- und Seitenzahnbereich mit höchstens zwei Zwischengliedern mittels dentaler CAD/CAM - Frästechnik.



smile

PREMIO

ALEGRA



EINFACH ÄSTHETISCH EINFACH STABIL EINFACH ALEGRA

Vorteile

- vier Gradienten Premium Zirkon
- alle Indikationen - keine Limits
- homogener Multilayer Farbverlauf
- fließend ansteigender Transluzenzgrad bis 49%
- Festigkeitsanstieg bis 1300 MPa
- Risszähigkeit bis $> 5 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$
- herausragende lichtoptische Eigenschaften
- verlässlich reproduzierbare Farbwiedergabe
- Transluzenz ganz ohne Grau- oder Grünstich
- sehr glatte Oberflächen
- Präzise auf das Vita-Farbsystem abgestimmt
- alle Vita Farben plus Bleach 1 und 2
- sehr gute Fräseigenschaften
- einfachste Handhabung
- reduzierte Lagerhaltung
- für alle gängigen Fräsmaschinen (98,5 und 95mm)



Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99

primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Nähere Detail- und Preisinformationen im Web
oder telefonisch bei primotec unter

Telefon **+49(0) 61 72 - 99 770 - 0**

